

自動排泄處理裝置『AEP』規格書

外型尺寸	寬160mm×長450mm×高400mm（設置在床下）		
本體重量	約5 k g		
電源	AC100V～240 V 50/60Hz		
遙控	按鈕式		
防止逆流箱	平衡重量方式		
本體材質	SPCC（烤漆）		
排泄物回收箱	8公升	材質	聚丙烯
洗淨水供給箱	5公升	材質	聚丙烯
洗淨水溫度	適溫（付保溫套）		
最多處理次數	約8次		
付加機能	自動檢測感應器（極限開關）		
排泄物回收袋	170mm×750mm	材質	特殊聚乙烯
杯子(單位)	特殊專用形狀	材質	矽膠
床墊(臀部交換)	洞 有/無 交換可	材質	硬性聚氨酯
顏色	象牙/咖啡		
特徵	該裝置在床的正下方,以最短的距離自動回收排泄物,同時利用特殊規格的矽膠治具將臀撐開,藉此設計來落實肛門的洗淨及吹乾,確保清潔與衛生.		

AEP立上手順書



特殊寝台『マックス』を用意して下さい。

首先準備多功能護理床(MAX)



ヘッドボード（頭側）・フットボード（足側）をはめて下さい。

將床頭板和床尾板分別裝上



ローレットネジを指で右に回して固定して下さい。

手轉螺絲用手指向右轉好固定



特殊寝台『マックス』の準備完了です。

多功能護理床(MAX)準備作業完成



PBスイッチのコードをヘッドボードにかけて下さい。

請將PB開關器的線掛在床頭板上



特殊マットレス『スライダー』を用意して下さい。

準備特殊床墊(SLIDER)



『スライダー』を広げて下さい。

打開(SLIDER)床墊



センターパーツをはめ込んで下さい。

將裝置器置入床墊中心位



専用BOXシーツの穴を合わせてかぶせて下さい。

對準中心洞口,鋪上專用床罩



サイドバーを横の穴にはめ込んで下さい。

(頭側や足側に寄せてセットすることもできます。)

裝上床側護手欄杆

(床頭床尾可以調換用)



供給タンクに4Lまで水を入れて下さい。

供水箱請裝入4公升的清水



供給タンクをセットし、ホースを入れてキャップを締めて下さい。

設置供水箱,放入軟管擰緊蓋子



供給タンクの準備完了です。

供水箱準備作業完成



回収タンクに回収袋を入れて穴から出してください。

將回收袋放入回收箱然後從洞口將袋口拉出



回収袋に付属のOリングを通して下さい。

再將回收袋付屬的O型膠環套在袋口上



回収タンクをベッド下の引き出しにセットして下さい。

(引き出しは、必ずマグネットがロックするまで戻して下さい。)

將回收箱放在床下方的收納抽屜上

(要確保抽屜有回到磁鐵鎖上)



回収BOXに回収袋のOリングを使って接続して下さい。

用O型膠環將回收箱與回收袋栓住



回収袋の全周にOリングがかかっている事を確認して下さい。

確認O型膠環有栓住回收袋的四周




専用オムツカバーの穴を合わせてセットして下さい。
將專用尿布對準床中央的洞口鋪平



専用尿取りパットの穴を合わせてセットして下さい。
(尿取りパットには事前にハサミで穴を開けておいて下さい。)
再將專用紙尿片放在尿布上
(先將尿片用剪刀剪洞)



専用カップをセットして下さい。
(水出口、風出口が頭側になるようにセットして下さい。)
設置專用矽膠杯
(設置時請注意水和風的出口位置)

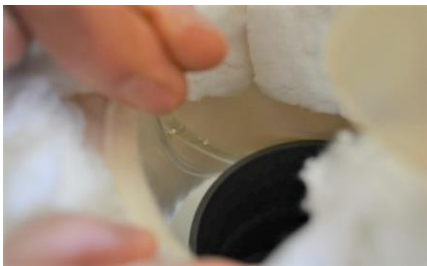

専用カップのホースをパイプとマットレスの間に通して下さい。
將專用矽膠杯的軟管從管道和床墊之間通過



太いホースを風側、細いホースを水側に接続して下さい。
寬軟管是風管請接風口,細軟管是水管請接水



差し込んだ後、少し引っ張って抜けない事を確認して下さい。
插入後,輕拉確認會否脫落



制御BOX横の電源プラグに付属の電源線を差し込んで下さい。
將電源線插入控制箱側的插頭上



電源スイッチをONして下さい。
開啟電源



制御BOX前面のLEDランプが青く点灯していれば準備完了です。
控制箱前面的綠色燈亮表示準備作業已完成



NGの場合はLEDランプがオレンジに点灯します。
(この写真の場合は供給タンクが空、回収タンクが満杯の状態です。)
橘色燈亮表示設置有誤
(例如照片所顯示的橘色亮燈,表示供水箱無水狀態,回收箱滿載狀態)



制御BOXにはカギがついています。
(初期：000です。任意に変更して下さい。)
控制箱又備鑰匙
(密碼:初期是000,請自行設定)



PBスイッチを1秒以上押すと設定された動作が始まります。
又、動作中に1秒以上押すと動作を強制終了できます。
PB開關按超過1秒被設定的動作就會開始運作
然後,運作中如果按超過1秒,該動作會強制終了.

AEP(自動排泄處理裝置)的操作手續說明書

初期確認

為了操作的安全起見,請先確認電源是否是關掉的狀態

AEP 的準備工作

1. 將裝水的水箱裡準備溫水（**20 度到 30 度**左右）後,倒入水箱設置
2. 將水管插入水箱
3. 把防臭的袋裝上回收馬桶箱裡
4. 把回收馬桶箱放在台上後,將防止逆流的箱子與袋接好（用圓環固定）

* 把所有的東西都準備好之後才將電源打開

使用者的準備

1. 跟使用者通告一聲
2. 將使用者的手臂交叉在胸前
3. 將雙腿的膝蓋撐起來
4. 讓使用者平躺
5. 把有洞口的尿布或有洞口的尿布護帶跟有洞口尿布吸水護墊設置好
6. 將杯罩放上（把排水的管子往下插接到有洞口的彈簧床）
7. 將配管跟自動操作裝置接上（細管是：水 粗管是：風）
8. 讓使用者歸位（盡量歸位到中間,並且確認肛門的三公分之內是否 跟杯罩接上）
9. 按著使用者的膝蓋，並確認屁股與杯罩的位置是否正確（若使用者自己可以將屁股抬高，讓使用者抬高後確認杯罩的位置）
10. 把尿布或尿布護帶包好

* 全部的準備跟安裝的工程完畢之後才可將 **AEP** 的電源打開

使用後的更換手續

1. 準備好一條用熱水扭乾的毛巾
2. 準備好擦屁股的濕巾
3. 準備一個水桶放回收杯罩的東西（請先將殺菌跟清洗藥水倒入水桶內）
4. 準備一個桶子裝回收垃圾用的（放防臭的袋）

5. 準備手套
6. 把有洞口的尿布或有洞口的尿布護帶跟有洞口的尿布吸水護墊準備好
7. 將 **AEP** 的電源關掉
8. 將配管跟自動操作裝置拔掉（細管是：水 粗管是：風）
9. 跟使用者通告一聲
10. 將使用者的手臂交叉在胸前
11. 將雙腿的膝蓋撐起來
12. 把尿布跟尿布的護帶打開
13. 讓使用者躺下
14. 帶上手套,用濕巾紙清理污垢的部分
15. 清理完污垢的部分之後,用熱毛巾擦拭
16. 把使用過的尿布跟尿布吸水護墊包起來
17. 讓使用者翻到反方向橫躺
18. 反方向的部分也用濕巾擦乾淨
19. 反方向的部分也用熱毛巾擦拭
20. 把杯罩取下,放入杯罩的回收水桶裡
21. 把使用過的尿布或尿布吸水護墊包好後,扔到裝回收垃圾的桶子
22. 將有洞口的尿布或有洞口的尿布護帶跟有洞口的尿布吸水護墊安裝好
23. 將杯罩放上（把配管往下插接到有洞口的彈簧床）
24. 將配管跟自動操作裝置接上（細管是：水 粗管是：風）
25. 讓使用者歸位（盡量歸位到中間，並且確認肛門的三公分之內是否跟杯罩接上）
26. 按著使用者的膝蓋,並確認屁股與杯罩的位置是否正確
27. （若使用者自己可以將屁股抬高,讓使用者抬高後確認杯罩的位置）
28. 把尿布或尿布護帶包好

*全部的準備跟安裝的工程完畢之後才可將 **AEP** 的電源打開