

自動排泄処理装置『AEP』仕様書

外形寸法	幅160mm×長450mm×高400mm（ベッド下部に設置）		
本体重量	約5 k g		
電源	AC100V～240V 50/60Hz		
リモコン	押しボタン式スイッチ		
逆止弁ボックス	バランスウェイト方式		
本体材質	SPCC（焼付塗装）		
排泄物回収タンク	8リットル	材質	ポリプロピレン
洗浄水供給タンク	5リットル	材質	ポリプロピレン
洗浄水温度	適温（保温カバー有）		
最大処理回数	約8回		
付加機能	自動検知センサー（リミットスイッチ）		
排泄物回収袋	170mm×750mm	材質	特殊ポリエチレン
カップユニット	特殊専用形状	材質	シリコン
マットレス臀部交換	穴 有/無 交換可	材質	硬質ウレタン
カラー	アイボリー/ブラウン		
特徴	ベッドの真下から最短距離で排泄物を自動回収し、臀部を開く 特殊仕様のカップにより、的確に肛門部の洗浄と乾燥を行い 常に肛門部を清潔に保つことができます。		

AEP(自動排泄処理装置)取り扱い手順書

初期確認

作業環境の安全を確認する
電源がOFFになっている事を確認する

1、 AEP動作準備

- 1、 供給水タンクにぬるま湯(20℃～30℃)を用意し、セットする
- 2、 供給水タンクにチューブを差し込む
- 3、 回収タンクにBOS袋をセットする
- 4、 回収タンクを台に載せ、逆止弁BOXにBOS袋を接続する(オーリングで固定)

* 電源は全て整ってからONにします。

2、 利用者準備

- 1、 利用者に声掛けをする
- 2、 腕を胸の前でクロスさせる
- 3、 両方の膝を立てる
- 4、 利用者を横にする
- 5、 穴あき紙おむつ又は穴あきおむつカバー＋穴あき尿取りパットをセットする
- 6、 カップを設置する(配管チューブをマットレスの穴から下方向に通す)
- 7、 配管チューブをワンタッチ継手に接続する(細い方:水 太い方:風)
- 8、 利用者を戻す(中心にくるように、また、カップのリブが肛門の上3cm位の位置にくるように戻す)
- 9、 利用者の立てた膝を押し、お尻を少し上げカップのリブの位置を確認する
(利用者が自分でお尻を上げられるなら、上げてもらいカップのリブの位置を調整する)
- 10、 紙おむつ又はおむつカバーを閉じる

* 全ての準備が整った事を確認し、AEPの電源をONにする

3、 利用後の交換手順

- 1、 お湯でゆすいだハンドタオルを用意する
- 2、 おしりふきナプキンを用意する
- 3、 カップ回収用のバケツを用意する(殺菌、洗浄液を入れておく)
- 4、 ゴミ回収用のバケツを用意する(BOS袋を入れておく)
- 5、 手袋を用意する
- 6、 穴あき紙おむつ又は穴あきおむつカバー＋穴あき尿取りパットを用意する
- 7、 AEPの電源をOFFにする
- 8、 配管チューブのワンタッチ継手を外す(細い方:水 太い方:風)
- 9、 利用者に声掛けをする
- 10、 腕を胸の前でクロスさせる
- 11、 両方の膝を立てる
- 12、 紙おむつ又はおむつカバーを開く
- 13、 利用者を横にする
- 14、 手袋をした手で汚れている部分をおしりふきナプキンで拭く
- 15、 汚れが取れたらお湯で濡らしたハンドタオルにて拭く
- 16、 汚れた紙おむつ又は尿取りパットを閉じる
- 17、 利用者を反対側の横にする
- 18、 反対側もおしりふきナプキンで拭く
- 19、 反対側もお湯で濡らしたタオルで拭く
- 20、 カップを取り外し、カップ回収用バケツに入れる
- 21、 汚れた紙おむつ、又は尿取りパットを丸めてゴミ回収用バケツに捨てる
- 22、 穴あき紙おむつ又は穴あきおむつカバー＋穴あき尿取りパットをセットする
- 23、 カップを設置する(配管チューブをマットレスの穴から下方向に通す)
- 24、 配管チューブをワンタッチ継手に接続する(細い方:水 太い方:風)
- 25、 利用者を戻す(中心にくるように、また、カップのリブが肛門の上3cm位の位置にくるように戻す)
- 26、 利用者の立てた膝を押し、お尻を少し上げカップのリブの位置を確認する
(利用者が自分でお尻を上げられるなら、上げてもらいカップのリブの位置を調整する)
- 27、
- 28、 紙おむつ又はおむつカバーを閉じる

* 全ての準備が整った事を確認し、AEPの電源をONにする

AEP立上手順書



特殊寝台『マックス』を用意して下さい。



ヘッドボード（頭側）・フットボード（足側）をはめて下さい。



ローレットネジを指で右に回して固定して下さい。



特殊寝台『マックス』の準備完了です。



PBスイッチのコードをヘッドボードにかけて下さい。



特殊マットレス『スライダー』を用意して下さい。



『スライダー』を広げて下さい。



センターパーツをはめ込んで下さい。




専用BOXシーツの穴を合わせてかぶせて下さい。



サイドバーを横の穴にはめ込んで下さい。
(頭側や足側に寄せてセットすることもできます。)



供給タンクに4Lまで水を入れて下さい。

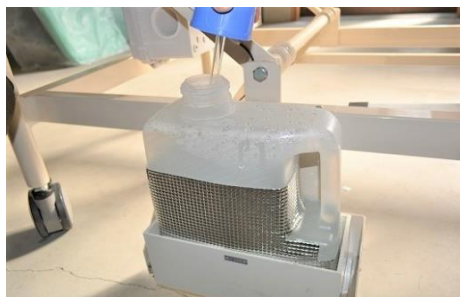

供給タンクをセットし、ホースを入れてキャップを締めて下さい。



供給タンクの準備完了です。



回収タンクに回収袋を入れて穴から出してください。




回収袋に付属のOリングを通して下さい。



回収タンクをベッド下の引き出しにセットして下さい。
(引き出しは、必ずマグネットがロックするまで戻して下さい。)



回収BOXに回収袋のOリングを使って接続して下さい。

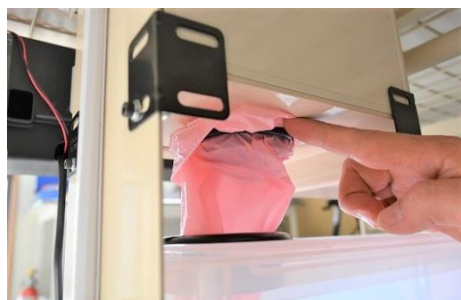

回収袋の全周にOリングがかかっている事を確認して下さい。



専用オムツカバーの穴を合わせてセットして下さい。



専用尿取りパットの穴を合わせてセットして下さい。
(尿取りパットには事前にハサミで穴を開けておいて下さい。)



専用カップをセットして下さい。
(水出口、風出口が頭側になるようにセットして下さい。)



専用カップのホースをパイプとマットレスの間に通して下さい。



太いホースを風側、細いホースを水側に接続して下さい。



差し込んだ後、少し引っ張って抜けない事を確認して下さい。



制御BOX横の電源プラグに付属の電源線を差し込んで下さい。



電源スイッチをONして下さい。



制御BOX前面のLEDランプが青く点灯していれば準備完了です。



NGの場合はLEDランプがオレンジに点灯します。
(この写真の場合は供給タンクが空、回収タンクが満杯の状態です。)



制御BOXにはカギがついています。
(初期：000です。任意に変更して下さい。)



PBスイッチを1秒以上押すと設定された動作が始まります。
又、動作中に1秒以上押すと動作を強制終了できます。